

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS LISTO PARA SU USO



Health & Biotechnology  
www.glscolombia.com

INFORMACIÓN GENERAL									
<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS LISTO PARA SU USO</b>								
<b>MARCA</b>	Actosed Endo Ready								
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2014DM-0011737 Vigente hasta: 29 de agosto de 2024								
<b>TIPO DE DISPOSITIVO</b>	No Invasivo								
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA								
<b>FABRICANTE</b>	ACTO GmbH Büchner Strasse 11, D-38118 Braunschweig Tel: +0 531-239 508-0								
<b>IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR</b>	GLS Health & Biotechnology S.A. Carrera 17 # 145A - 62. Bogotá, Colombia Tel: (57+1) 527 1429 / 30								
									
DESCRIPCIÓN									
<p>Actosed Endo Ready tiene una presentación lista para su uso y se utiliza para la desinfección de equipos quirúrgicos. Contiene sustancias que previenen la corrosión y no contiene aldehídos ni fenol. Limpia y desinfecta al mismo tiempo. El producto puede utilizarse en todos los métodos de circulación, aplicación manual y equipos ultrasónicos.</p>									
ÁREA DE APLICACIÓN									
<p>El producto puede ser utilizado en equipos médicos, equipos quirúrgicos MIC, endoscopios, materiales para anestesia y materiales a prueba y no aprueba de calor, baños de desinfección de equipos, máquinas lavadoras ultrasónicas, máquinas manuales y endoscópicas.</p>									
MÉTODO DE APLICACIÓN									
<p>Colocar la solución dentro del baño de desinfección. Desmontar los equipos y colocarlos dentro de la solución. Asegurarse de que la solución cubra todos los equipos. Esperar 15 minutos. Sacar los equipos de la solución. Enjuagarlos y secarlos cuidadosamente.</p>									
PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS									
<p>La solución puede utilizarse durante 15 días. Descartar antes de 15 días si la solución presenta un aumento en la turbiedad y en la contaminación.</p>									
ESPECIFICACIONES									
<b>Composición Química</b>	<p><b>pH:</b> 9.0 ~ 10.0 g/ml  <b>Color:</b> Líquido Claro Amarillento  <b>Cada 100g contiene:</b> 0.59g Bis (3-aminopropil) dodecilamina, 0.72g de Propionato de Didecil-metil-polioxietyl-amonio y sustancias auxiliares.</p>								
<b>Concentración de uso</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bactericida inc. Tbc.</td> <td style="width: 15%;">15 min.</td> <td style="width: 33%;">Esporicida</td> <td style="width: 19%;">60 min.</td> </tr> <tr> <td>Fungicida</td> <td>15 min.</td> <td>Virucida*</td> <td>15 min.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">*(HBV/HCV, VIH, Papovavirus, Poliovirus, Rotavirus, Adenovirus).</p>	Bactericida inc. Tbc.	15 min.	Esporicida	60 min.	Fungicida	15 min.	Virucida*	15 min.
Bactericida inc. Tbc.	15 min.	Esporicida	60 min.						
Fungicida	15 min.	Virucida*	15 min.						
<b>Estabilidad / Vida útil</b>	3 años en su empaque original y sin destapar.								
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conservar en un lugar fresco y seco.</li> <li>- Proteger de los rayos directos del sol.</li> <li>- Almacenar a una temperatura inferior de +25°C.</li> </ul>								

**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
**DESINFECTANTE SIN ALDEHÍDOS PARA**  
**INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS**



Health & Biotechnology  
[www.glscolombia.com](http://www.glscolombia.com)

PRESENTACIÓN COMERCIAL		
Código	Referencia	Presentación
01.8203.5	Actosed Endo Ready x 5 L	Frasco de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
01.8203.10	Actosed Endo Ready x 10 L	