


DERMAFIX®

FICHA TECNICA APOSITOS DE TEJIDO SIN TEJER

NOMBRE DEL PRODUCTO:	DERMAFIX®									
FOTOGRAFIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO									
 <p>DERMAFIX®</p> <ul style="list-style-type: none"> Adhesive, non-woven fabric for dressing retention Highly adaptable Provides security and comfort Material elástico; no tejido, hipoalergénico, para múltiples usos. <p>Indications</p> <ul style="list-style-type: none"> Retention of post-operative wound dressings. Retaining gauze and absorbent pads. To secure catheters and drainage tubes. <p>Indicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Retención de apósitos en uso post-operatorio Retención de gases y almohadillas absorbentes Fijación de catéteres y tubos de drenaje 	<p>Rollo de tejido sin tejer fabricado en fibras de poliéster entrelazadas. Masa adhesiva en poliacrilato. Esparadrapo elástico, poroso e hipoalergénico.</p> <table border="1" data-bbox="888 864 1527 1384"> <tr> <td data-bbox="888 864 1110 965">SOPORTE</td> <td data-bbox="1110 864 1527 965">Tela no tejida, 100% poliéster</td> </tr> <tr> <td data-bbox="888 965 1110 1070">MASA ADHESIVA</td> <td data-bbox="1110 965 1527 1070">Poliacrilato hipoalergénico y poroso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="888 1070 1110 1211">PRESENTACION</td> <td data-bbox="1110 1070 1527 1211"> Rollo: 5cm x 10 mts - 10cm x 10 mts 15cm x 10 mts </td> </tr> <tr> <td data-bbox="888 1211 1110 1384">UNIDAD DE EMPAQUE</td> <td data-bbox="1110 1211 1527 1384"> Carton x 36 cajas x 2 rollos Carton x 36 rollos, caja x 1 rollo Carton x 36 rollos, Caja x 1 rollo </td> </tr> </table>		SOPORTE	Tela no tejida, 100% poliéster	MASA ADHESIVA	Poliacrilato hipoalergénico y poroso	PRESENTACION	Rollo: 5cm x 10 mts - 10cm x 10 mts 15cm x 10 mts	UNIDAD DE EMPAQUE	Carton x 36 cajas x 2 rollos Carton x 36 rollos, caja x 1 rollo Carton x 36 rollos, Caja x 1 rollo
SOPORTE	Tela no tejida, 100% poliéster									
MASA ADHESIVA	Poliacrilato hipoalergénico y poroso									
PRESENTACION	Rollo: 5cm x 10 mts - 10cm x 10 mts 15cm x 10 mts									
UNIDAD DE EMPAQUE	Carton x 36 cajas x 2 rollos Carton x 36 rollos, caja x 1 rollo Carton x 36 rollos, Caja x 1 rollo									
CARACTERISTICAS:	<p>Resistente a la Tracción Elasticidad Transversal Permeable al aire y al vapor de agua Se puede Esterilizar Indiferente a las radiaciones.</p>									

DESCRIPCION GENERAL

Rollo de tejido sin tejer de poliéster lo que permite una buena adaptación a los diferentes contornos del cuerpo conservando el movimiento normal del paciente. Alta tolerancia cutánea, con un mínimo de riesgo de alergia debido a sus ingredientes compatibles con la piel.

Es permeable al aire y a la humedad, reduciendo el riesgo de maceración

Excelente adhesividad inicial y permanente al igual que proporciona una técnica de retiro fácil e indolora que no deja residuos en la piel.

INSTRUCTIVO DE APLICACION

1. Limpie y seque la piel del área en la que se va a realizar la fijación.
2. Corte la cantidad necesaria teniendo en cuenta dejar 1 cm de pestaña
3. Retire el papel cuadrículado protector
4. Fije en forma suave pero firme.

Importador Exclusivo: **LP ADVANCED MEDICAL LTDA**
Registro Invima : **No. 2012DM 0008658**
Dirección: Carrera 28 N° 71 - 70
Ciudad: Bogotá. D.C. Colombia
Contacto: Eduardo Lozano V.
Teléfonos: 8133582 / 7568417 /3112518979
Fax: 8132879
E-mail: gerencia@lpadvancedmedical.com
Sitio Web: www.lpadvancedmedical.com



CONCEPTO DE PRODUCTO DE APÓSITOS DE TEJIDO SIN TEJER

DERMAFIX®

Fecha: -----

Institución: -----

Servicio: -----

Le invitamos a calificar nuestro producto de acuerdo a su experiencia durante el tiempo de utilización del mismo, teniendo en cuenta que **E: Excelente B: Bueno, R: Regular**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CONCEPTO TÉCNICO		
	E	B	R
Características Hipoalergénicas			
Adhesividad inicial			
Adhesividad final			
Resistencia a la tracción transversal			
Comportamiento ante la humedad			
Facilidad al retirarlo			
Permeabilidad al aire y al vapor del agua.			
Facilita el movimiento libre del sitio de Fijación.			

Usted recomendaría a **DERMAFIX** para ser comprado en su Entidad? SI _____ No _____

OBSERVACIONES: _____

LP Advanced Medical Ltda.