



Health & Biotechnology
www.glscolombia.com

C.V. MEDICA®

FICHAS TÉCNICAS

PRODUCTOS
DE HIGIENE

ESPONJA CON JABÓN:

• **DISPOFOAM®**

Fabricado por:
CVMEDICA, S.L.

Importado Por:
EUROCLEAN MEDICAL

Comercializado Por:
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
Tel: 5271429 / 5271430

11/06/2012 Rev.05

FICHA TÉCNICA

INDICACIONES:

DISPOFOAM®, es una esponja higiénica, de uso sanitario, desechable y reciclable, lista para liberar todas sus propiedades higiénicas en el momento que entra en contacto con el agua.

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial atención.



DISPOFOAM®, con su concepto de UN SOLO USO elimina radicalmente cualquier posibilidad de reinfecciones ante la absoluta seguridad de que ya no será usada por segunda vez.

Contiene la cantidad de jabón adecuada para la limpieza completa de un adulto.

Este producto no presenta incompatibilidades con otros productos.


COMPOSICIÓN:

ESPONJA: Espuma de poliuretano 100%.

GEL: Gel dermatológico con pH 5.5. Ingredientes: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Parfum, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazoline (and) Methylisothiazolinone, Citric Acid, C.I.61570 y C.I. 19140.

MODO DE EMPLEO:

Tal y como se puede apreciar en las ilustraciones que vienen impresas en el envoltorio, esta es la correcta forma de utilización de nuestras esponjas con gel seco de C.V. MÉDICA, S.L.

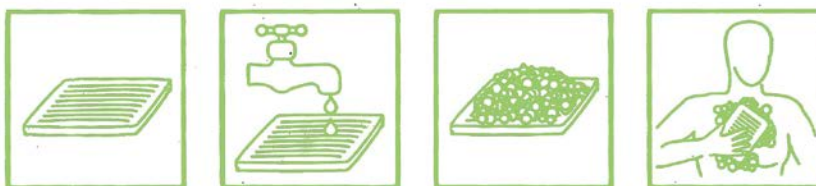

Basta con mojar ligeramente la esponja. El gel se activa con unas pocas gotas de agua. Frotar sobre la piel para que DISPOFOAM® libere espuma suave, activa y perfumada con la que practicar una higiene segura y cómoda en cualquier situación.

Para sacar el máximo rendimiento al producto debe utilizarse con POCA AGUA. No debe estrujarse dentro de un recipiente con agua, sino simplemente humedecerla e irá saliendo el jabón poco a poco mientras se está lavando al paciente.

No hace falta aclarar, con la misma esponja o una toalla se procederá al secado de la piel. El gel utilizado es de pH 5.5, muy adecuado para el cuidado e higiene de pieles sensibles o con problemas.



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS :


El gel utilizado en la fabricación de DISPOFOAM® es suave, gracias a los emolientes presentes en su composición, de pH 5.5, ligeramente ácido, que ayuda a mantener la barrera protectora de la piel y proporciona asimismo un agradable y fresco aroma.

En cuanto a la esponja, su característica principal es su suavidad.

PREVENCIÓN. Paradójicamente, la higiene de los pacientes, puede convertirse también en un foco nada desdeñable de posibles contagios para otros pacientes o para sus cuidadoras. Incluso respetando escrupulosamente la regla básica de una esponja personal para cada paciente, en dicha esponja por mucho que se limpie, quedarán siempre residuos de heces fecales que, con las condiciones de humedad propias de la esponja será un magnífico caldo de cultivo para colonias bacterianas que pasarán a la piel del paciente, con el consecuente riesgo de sobreinfecciones o incluso con la posibilidad de contraer infecciones nosocomiales.

COMODIDAD. En cualquier ocasión, a la hora de higiene personal, sobretodo en situaciones de ingresos hospitalarios o prolongadas estancias en cama, con una simple esponja DISPOFOAM® será suficiente para una higiene rápida, correcta y segura del paciente.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO:

REFERENCIA	ESPESOR (cm)	L (cm)	A (cm)	
0005403	1	20	12	

* TOLERANCIAS: Altura y anchura, ±1 cm. Espesor, ±0.2 cm

PRESENTACIÓN:

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	ENVASADO	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
0005403	2.400 120 PACKS DE 20UN.	MÚLTIPLE	82x62x62	14.5
0005403B	1000 20 UD 50 BOLSAS	MÚLTIPLE	84x50x73	4.6
0005403C	500 20 UD 25 B	MÚLTIPLE	70x44x47	3.6

CUMPLE CON:

- ISO 10993-10 Ensayo de la irritación de la piel.
- Sistema de Calidad basado en la ISO 9001 Gestión de la Calidad.
- Licencia Fabr. Num. : 7626-CS

